

RingConn

Deutsch

Wichtige Sicherheitshinweise

Dieses Produkt enthält elektronische Geräte. Lesen Sie bitte vor der Benutzung des Geräts die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten:

1. Nehmen Sie das Gehäuse des Produkts nicht auseinander.
2. Die eingebaute Batterie darf nicht ausgetauscht werden.
3. Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel zur Reinigung.
4. Laden Sie nicht auf, wenn es feucht oder nicht vollständig trocken ist.
5. Setzen Sie es nicht über einen längeren Zeitraum direktem Sonnenlicht aus.
6. Verwenden Sie das Produkt nicht in einer Sauna oder einem Dampfbad.
7. Stellen Sie es nicht in einer Umgebung mit extremer Temperatur oder Feuchtigkeit auf.
8. Verwenden Sie es nicht, wenn es verformt oder innerlich beschädigt ist.
9. Legen Sie es nicht ins Feuer, da die Batterie explodieren könnte.
10. Bitte verwenden Sie zum Aufladen des Rings die Standard-Ladeschale von RingConn und zum Aufladen der Ladeschale einen zertifizierten Netzadapter.
11. Wenn die Produkttemperatur während des Ladevorgangs zu hoch ansteigt oder sehr heiß wird, unterbrechen Sie bitte sofort den Ladevorgang.
12. Dieses Produkt hat einen eingebauten Lithium-Akku. Wenn der Akku über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, kann es zu Kapazitätsverlust, Ausdehnung, Alterung, Korrosion der Leiterplatten oder anderen Sicherheitsrisiken für das Akku oder zu Produktschäden aufgrund der Akku-Eigenschaften kommen. Es wird empfohlen, den Akku vor der Beendigung des Gebrauchs auf etwa 70 % aufzuladen, ihn in einer Ladeschale aufzubewahren, um die Leistung aufrechtzuerhalten, und den Ring und die Ladeschale regelmäßig aufzuladen.

Lieferumfang



RingConn Gen 2
Intelligenter Ring



Smart Ladeschale



Typ-C-Kabel



Benutzerhandbuch,
Schnellstart-Anleitung



Diese Informationen dienen nur zu Referenzzwecken und stellen keine Form der Verpflichtung dar. Bitte sehen Sie sich das jeweilige Produkt an, um genaue Informationen zu erhalten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Farbe, Größe usw.).

Diese Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen diesen Informationen und der Produktbeschreibung auf der offiziellen Website sind die Angaben auf der offiziellen Website maßgebend.

Produktinformation

Produktbezeichnung	RingConn Gen 2 Intelligenter Ring
Modell des Produkts	RCA-01-6 RCA-01-7 RCA-01-8 RCA-01-9 RCA-01-10 RCA-01-11 RCA-01-12 RCA-01-13 RCA-01-14
Batteriekapazität des Rings	3.85V,12mAh(6#-7#),13.5mAh(8#-11#),15mAh(12#-14#)
Lademethode/Ladezeit	Magnetische Aufladung / ca. 90 Minuten für volle Aufladung
Übertragungsmodus	Bluetooth 5.0
Kompatibilität	iOS 14.0, Android 8.0, Bluetooth 4.0 und höher
Offline-Speicher	5 bis 7 Tage
Material	Metallisches Titan
Ringgewicht (netto)	2-3 grams
Arbeitstemperatur	0°C - 40°C / 32°F - 104°F
Schutzart	IP68
Produktbezeichnung	Smart Ladeschale
Batteriekapazität der Ladeschale	500 mAh
Lademethode/Ladezeit	
Gewicht der Ladeschale (netto)	80 grams
BT Frequenzbereich	2400~2483.5MHz
Maximale RF-Ausgangsleistung	0,00050W

- **Haftungsbeschränkung:** In keinem Fall haften RingConn, seine Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen, leitenden Angestellten, Direktoren, Mitarbeiter, Vertreter, Agenten, Partner und Händler für Schäden jeglicher Art, die aus oder in Verbindung mit Ihrer Nutzung oder der Unmöglichkeit der Nutzung des Produkts, des Dienstes oder damit verbundener Inhalte oder einer anderen Website oder eines Dienstes oder Artikels, auf den über den Dienst zugegriffen wird, entstehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf direkte, indirekte, besondere, zufällige oder Folgeschäden oder Ausschlussschäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Personenschäden, Schmerzen und Leiden, seelisches Leid, Einkommensverluste, Gewinnverluste, Verlust von Geschäften oder erwarteten Einsparungen, Verlust von Geschäftsmöglichkeiten, Geschäftsunterbrechung, Nichtverfügbarkeit, Verlust von Firmenwert oder Datenverlust, unabhängig davon, ob das Vorstehende durch unerlaubte Handlungen (einschließlich Fahrlässigkeit), vertraglich oder anderweitig verursacht wurde, selbst wenn die Ursache vorhersehbar war. Dieser Ausschluss oder diese Haftungsbeschränkung gilt unabhängig davon, ob RingConn auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde oder nicht.
- Das Vorstehende berührt nicht die Haftung, die nach geltendem Recht nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden kann. Soweit die Haftung nicht gemäß dem Vorstehenden ausgeschlossen oder beschränkt werden kann, darf die Haftung von RingConn für Ansprüche aus Vertrag, unerlaubter Handlung oder anderen Haftungstheorien in keinem Fall hundert US-Dollar (100 \$) übersteigen.

Medizinischer Haftungsausschluss

- **Warnhinweis:** Dieses Produkt ist kein medizinisches Gerät. RingConn und die zugehörigen Anwendungen sind nicht dazu gedacht, Krankheiten oder medizinische Zustände zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder zu verhindern. Bitte konsultieren Sie einen Arzt, bevor Sie Ihr Trainings-, Schlaf- oder Diätprogramm anpassen.
- **Wichtige Sicherheitshinweise:**
 1. Wenn Sie bereits bestehende gesundheitliche Probleme haben, die durch die Verwendung dieses Produkts beeinträchtigt werden könnten, sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt.
 2. Dieses Produkt dient zur Aufzeichnung von Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Schlaf und anderen damit verbundenen Daten. Längerer Gebrauch des Produkts kann zu Hautreizungen führen. Wenn Sie Rötungen, Schwellungen, Juckreiz oder andere allergische Symptome bemerken, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt und suchen Sie umgehend medizinische Beratung.
 3. Achten Sie auf die richtige Weite des Rings, damit er nicht zu fest sitzt und die Durchblutung nicht beeinträchtigt wird.
 4. Benutzen oder betrachten Sie das Produkt nicht während der Autofahrt oder in Situationen, die Konzentration erfordern.
 5. Dieses Produkt ist kein Spielzeug und nicht für den Gebrauch durch Minderjährige bestimmt. Es enthält Kleinteile, die beim Verschlucken eine Erstickungsgefahr darstellen können. Bitte bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Minderjährigen auf.
 6. Die Leistung dieses Produkts kann durch äußere Faktoren beeinflusst werden. Bitte legen Sie den Ring nicht in eine Umgebung mit übermäßiger Hitze, Kälte oder hellem Außenlicht. Die Leistungsdaten in diesen Informationen dienen daher nur als Referenz.

7. Stechen Sie nicht in den Ring oder die Batterie in der Mitte ein, da sonst die Gefahr eines Kurzschlusses des Produkts besteht.
8. Dieses Produkt kann ein Risiko für Benutzer mit bestimmten Symptomen oder bestimmten medizinischen Bedingungen darstellen.
Wenn Sie an einer der folgenden Krankheiten leiden, verwenden Sie dieses Produkt nicht mehr und fragen Sie Ihren Arzt um Rat:
·Epilepsie oder Lichtempfindlichkeit; ·Schlechte Durchblutung oder Schürfwunden;
·Herzkrankheiten oder andere medizinische Probleme; ·Wenn Sie photosensibilisierende Medikamente einnehmen.

Verwendung und Wartung

1. Die Größe Ihres Fingers ändert sich zu verschiedenen Tageszeiten, und manchmal kann es schwierig sein, den Ring zu entfernen.
Wenn Sie Schwierigkeiten haben, den Ring zu entfernen, versuchen Sie bitte die folgenden Methoden:
 - Befeuchten Sie Ihren Finger mit milder Seifenlauge oder kaltem Wasser und drehen Sie ihn langsam, um den Ring zu entfernen;
 - Heben Sie die Hand über die Brust, bis Ihr Blutdruck sinkt, und versuchen Sie dann, den Ring zu entfernen;
 - In Notfällen und wenn Sie sich unwohl fühlen und den Ring nicht selbst entfernen können, suchen Sie bitte sofort einen Arzt auf.
2. Nehmen Sie den Ring beim Krafttraining, beim Halten einer Schaufel oder eines anderen schweren Werkzeugs oder beim Halten von Gegenständen aus Metall, Keramik oder Stein ab, um Verschleißerscheinungen zu vermeiden.
3. Bitte legen Sie den Ring nicht in einen Ultraschallreiniger, um Schäden an einigen Komponenten zu vermeiden.
4. Das Produkt ist beim alltäglichen Benutzen wasserdicht. Sie können ihn im Schwimmbad und bei anderen Aktivitäten im flachen Wasser tragen. Bitte vermeiden Sie die Verwendung in heißen Quellen, Saunen (Dampfbädern), beim Tauchen und in jeder anderen Umgebung mit extremer Temperatur oder Feuchtigkeit.
5. Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts nicht zu viele Hautpflegeprodukte auf Ihre Hände auf, um eine Korrosion der Oberfläche zu vermeiden.
6. Reinigen Sie den Ring regelmäßig mit Wasser und milder Seife und wischen Sie ihn mit einem weichen Tuch ab, wobei Sie besonders auf die mit der Haut in Kontakt kommenden Teile achten sollten.
7. Nehmen Sie Ihren Ring von Zeit zu Zeit ab, damit sich Ihre Haut entspannen kann, und nutzen Sie diese Zeit, um Ihren Ring aufzuladen.
8. Der Ring kann zerkratzt werden und die Haut an den Stellen zerkratzen, die in engem Kontakt mit dem Ring stehen. Schmuck aus weicheen Materialien wie Gold und Silber sowie elektronische Produkte mit weichen Beschichtungen sollten vorsichtig und geschützt verwendet werden, um Kratzer durch den Ring zu vermeiden.
9. Legen Sie den Ring nach dem Gebrauch in eine Ladeschale, um den Akku zu schonen und seine Lebensdauer zu verlängern, und laden Sie ihn und die Ladeschale regelmäßig auf. Es wird empfohlen, den Akku mindestens alle 15 Tage aufzuladen.

Garantie

RingConn LLC bietet eine 1-jährige Garantie für Ihren RingConn Smart Ring.

Um Ihr Produkt für die Garantie zu registrieren, besuchen Sie bitte: <https://ringconn.com/return-refund-policy/>

Für einen Garantieanspruch, benötigen wir: eine Kopie des Kaufbelegs eines autorisierten Händlers.

Für allgemeinen Support oder bei Anfragen kontaktieren Sie uns bitte unter cs@ringconn.com

Wenn das zum Zeitpunkt des Kaufs geltende örtliche Recht eine längere Garantiezeit als ein (1) Jahr vorschreibt, wird diese Garantie in dem Umfang verlängert, wie es das Gesetz verlangt.

<https://ringconn.com/pages/euro-compliance>



Version:V1.0/RCA-01

Made in China
中国制造

